



we integrate. active.

# Kurzanleitung

## LogoFoXX und EDKS auf NuVoice/Accent





we integrate. active.

## Inhaltsverzeichnis

In der vorliegenden Kurzanleitung werden folgende Punkte beschrieben:

1. Menü TOOLS.....	3
2. Feld bearbeiten via Setup-Taste.....	5
3. Bild ändern oder Foto einfügen.....	8
4. Sprachausnahmen.....	9
5. Backup .....	11



we integrate. active.

Die Anleitung erklärt erste Schritte in der Programmierung der Software NuVoice auf der PC-Emulation oder auf dem Accent direkt mit dem Einsatz der Setup-Taste.

## 1. Menü TOOLS

### 1.1. Menü TOOLS öffnen



Gerätetaste TOOLS auf dem Talkergehäuse drücken



oder

Taste auf dem Bildschirm drücken

In beiden Fällen erscheint anschliessend das Menü TOOLS mit dem Zugang zur Toolbox und der Setup-Taste:





we integrate. active.

## 1.2. Toolbox öffnen

1.2.1. Im Menü TOOLS  drücken

1.2.2. Toolbox öffnet sich

MENÜ ANSAGEN	MENÜ ANSTEUERUNG	MENÜ AUSGABE	MENÜ AUSSPRACHE	SEITE ANLEGEN	SEITE AUSWAHLEN	SEITE ÄNDERN	SEITE LÖSCHEN	SEITE ANORDNEN
MENÜ DATEI VERWALTUNG	MENÜ DECKBLATT UND BENUTZER BEREICH	MENÜ EINSTELLUNGEN	MENÜ FEEDBACK	DIALEKTE ANLEGEN	DIALEKTE AUSWAHLEN	DIALEKTE ÄNDERN	DIALEKTE VERKNÜPFEN	WORT SUCHEN
MENÜ INFRAROT	MENÜ KALENDER	MENÜ KAMERA	MENÜ MP3 PLAYER	KERNTASTE BELEGEN	KERNTASTEN ANORDNEN	KERN SPEICHERN	KERN LÖSCHEN	START
MENÜ NOTIZBUCH	MENÜ SPEICHER ÜBERTRAGUNG	MENÜ STIMME	MENÜ SYSTEM	LÖSCHE DISPLAY	LEISER	LAUTER	SPRACHE EIN/AUS	SCHRIFT MODUS
MENÜ UHR	MENÜ VOKABULAR KONTROLLE	MENÜ VOKABULAR MANAGEMENT	MENÜ WORTVORHERSAGE	STANDBY	KOPFHÖRER LEISER	KOPFHÖRER LAUTER	RECHNER	OK

Die Toolbox («Werkzeugkasten») ist eine Ebene der Talker-Software mit speziellen Funktionen zum Einstellen und Anpassen des Talkers, siehe Abschnitte 4, 6 und 7 in dieser Kurzanleitung.

## 1.3. Setup-Taste

Mit der Setup-Taste können Felder des Vokabulars bearbeitet werden, wie im nachfolgenden Abschnitt 2 beschrieben.




we integrate. active.


## 2. Feld bearbeiten via Setup-Taste

2.1. Zur Seite navigieren, auf der eine Taste bearbeitet werden soll


2.2. Menü TOOLS öffnen

2.3. Setup-Taste  drücken

2.4. Zu bearbeitende Taste drücken

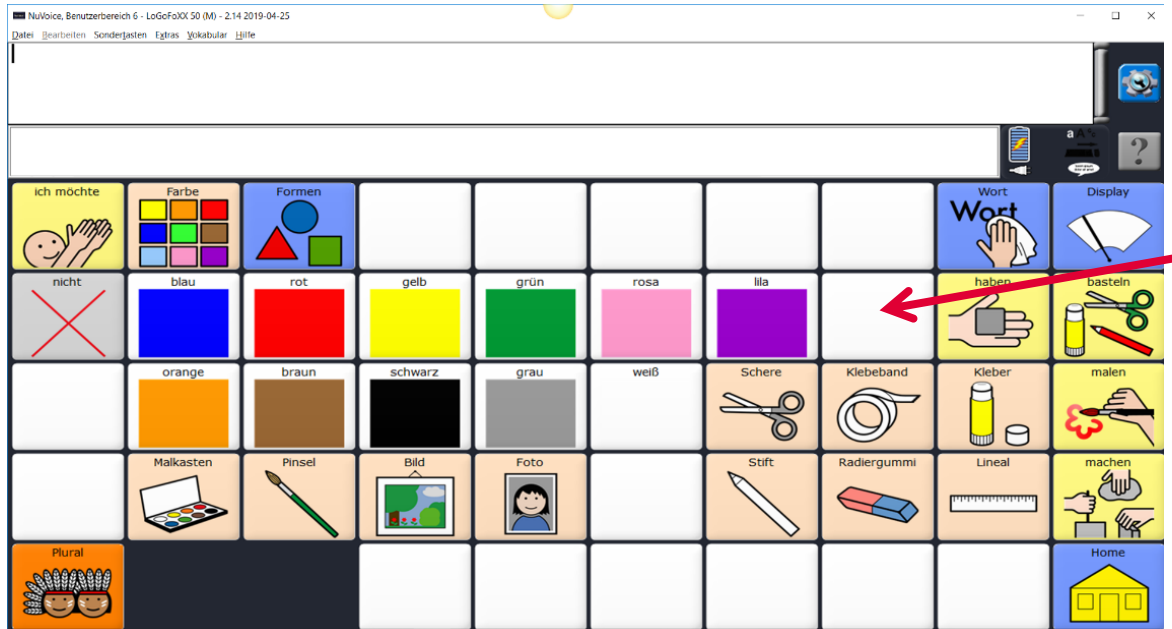

## 2.5. Taste bearbeiten

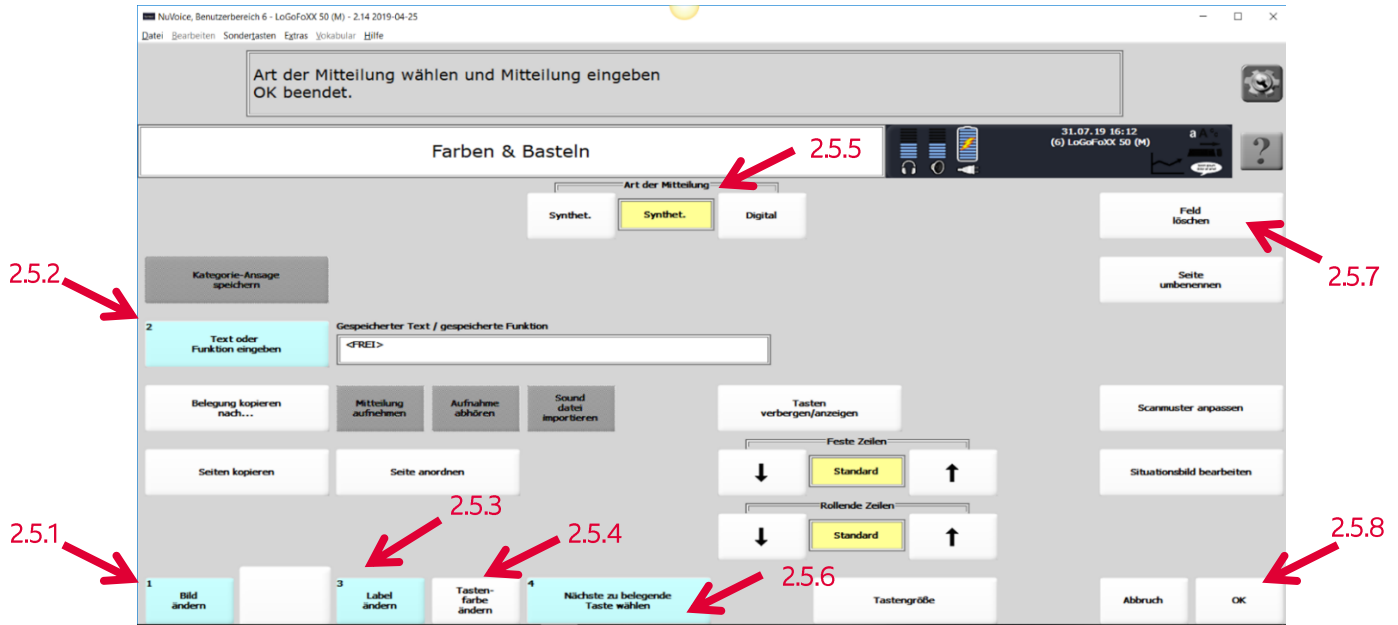

2.5.1. **Bild ändern:** Bild / Foto für das Feld auswählen. War das Feld bisher leer, wird der Bildname automatisch als Label und gesprochenen Text übernommen. Details siehe Abschnitt «Bild ändern oder Foto einfügen».

2.5.2. **Text oder Funktion eingeben:** Vom Bildnamen abweichenden Text, der gesprochen, *oder* eine Funktion, die ausgeführt werden soll (z.B. siehe Abschnitt «Seite verknüpfen»)

### ACHTUNG

Bei Texteingabe muss am Wortende ein Leerzeichen gemacht werden.

2.5.3. **Label ändern:** Vom Piktogramm-Namen abweichenden Text, der auf der Taste geschrieben sein soll.

### Optional:

2.5.4. **Tastenfärb ändern**

2.5.5. **Art der Mitteilung:** «synthetisch» oder «digital» (= eigene Sprachaufnahmen)

2.5.6. **Nächste zu belegende Taste wählen:** um eine weitere Taste auf derselben Seite zu bearbeiten

2.5.7. **Feld löschen**


2.5.8. Änderungen mit «OK» speichern



we integrate. active.

### ACHTUNG


Auf der NuVoice-Software kann ein Feld alternativ zur Bearbeitung mittels Setup-Taste auch direkt mit einem Rechtsklick bearbeitet werden. Auf dem Talker funktioniert das ebenso, es wird für den Rechtsklick jedoch eine USB-Maus benötigt.

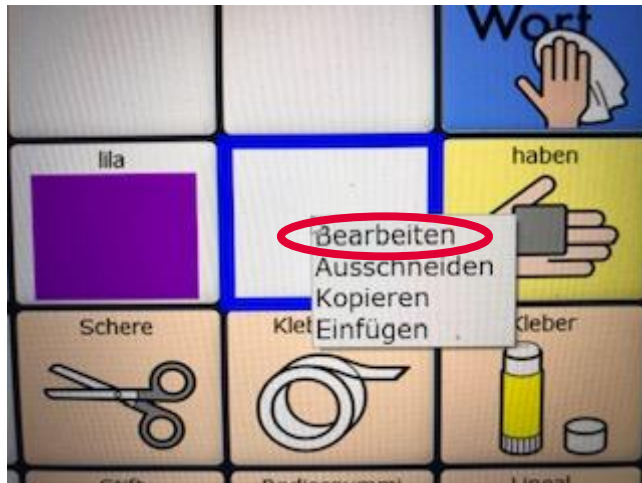

### 3. Bild ändern oder Foto einfügen

3.1. Schritte 2.1-2.4 aus Abschnitt 2 «Feld bearbeiten via Setup-Taste» wiederholen

3.2. «Bild ändern» drücken, sodass die folgende Seite erscheint, welche verschiedene Optionen auflistet:

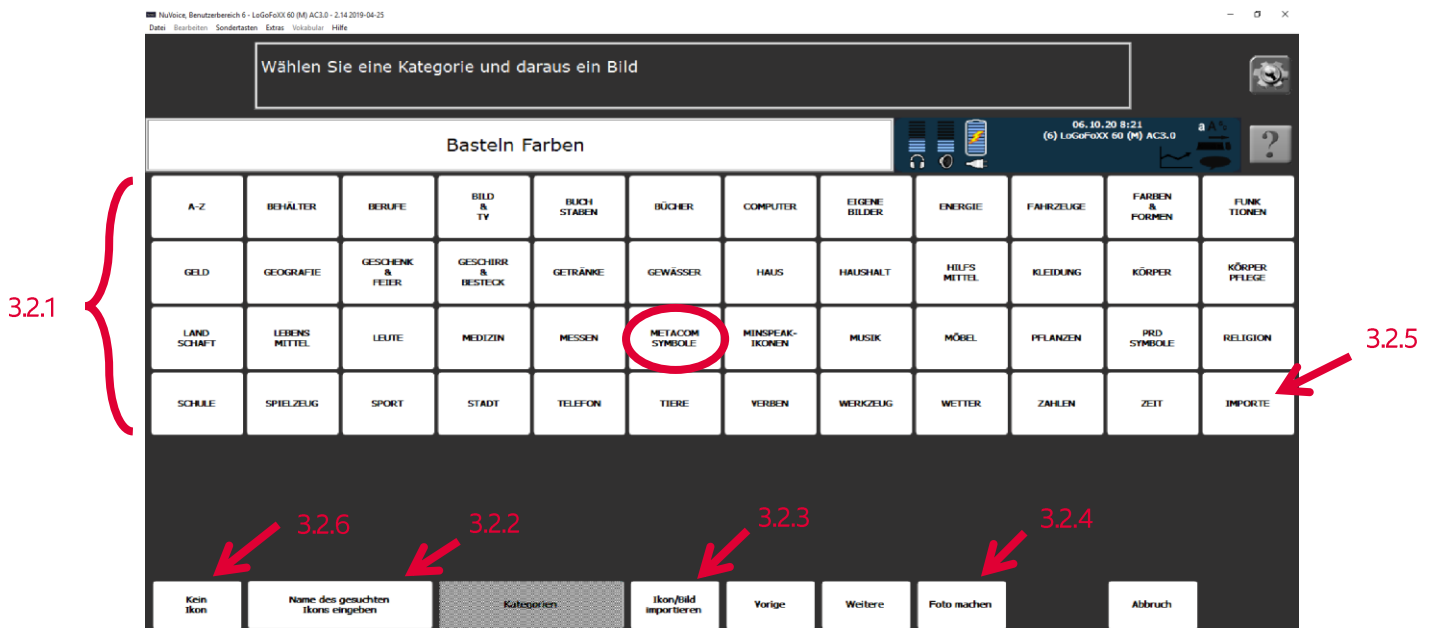

3.2.1. Nach A-Z oder in einzelnen Kategorien (inkl. Kategorie «Metacom Symbole») nach gewünschtem Ikon / Piktogramm suchen

3.2.2. Unter «Name des gesuchten Ikon eingeben» via Tastatur manuell nach einem Ikon / Piktogramm suchen

3.2.3. Unter «Ikon/Bild importieren» eigene Fotos von USB-Stick einfügen

3.2.4. Unter «Foto machen» direkt mit der Talker-Kamera (Front/Back) ein Foto aufnehmen

3.2.5. Unter «Importe» vorgängig in die Software eingefügte eigene Fotos suchen

3.2.6. «Kein Ikon», wenn nur der Text auf der Taste angezeigt werden soll





we integrate. active.

## 4. Sprachausnahmen


4.1. Toolbox öffnen

4.2. «Menü Aussprache» wählen

4.3. Lexikon der Sprechstimme wählen




4.4. Wort hinzufügen

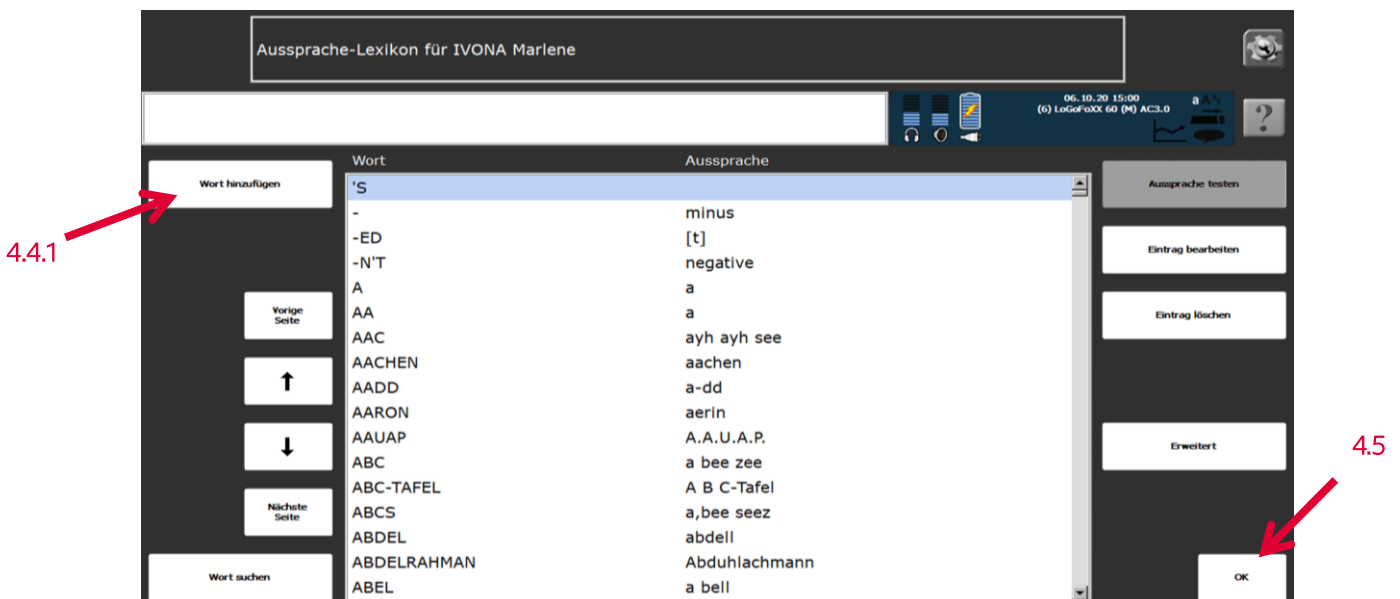

4.4.1. «Wort hinzufügen» drücken



we integrate. active.

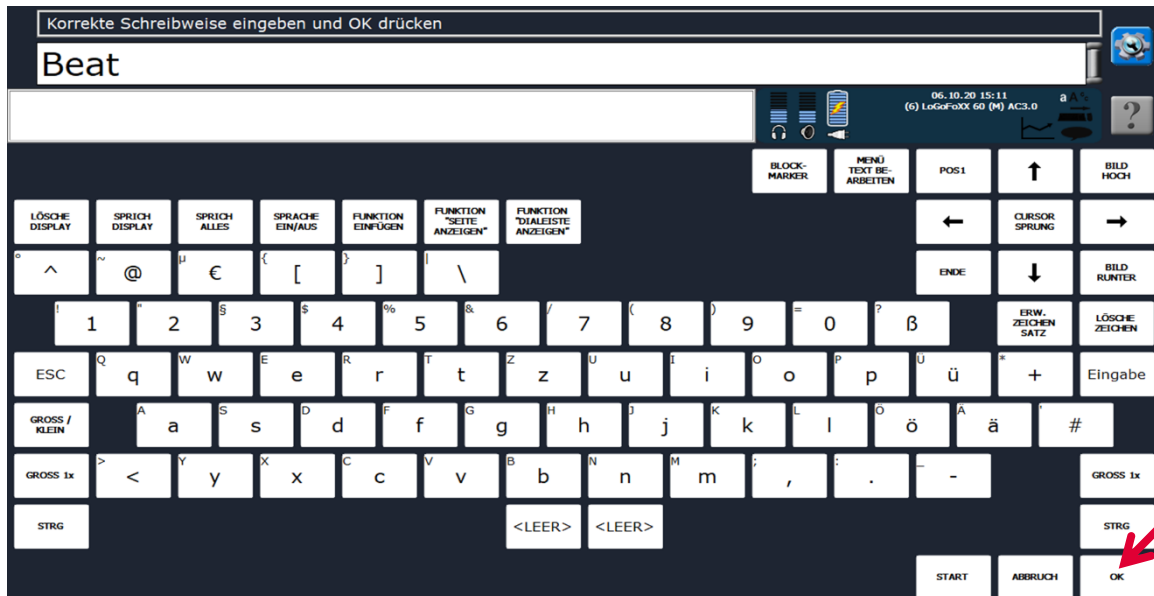

4.4.2. Wort schreiben (ohne Leerzeichen am Wortende)

4.4.3. Mit «OK» bestätigen



4.4.4. Phonetische Schreibweise eingeben

4.4.5. In das Textfenster oder auf die Taste «Sprich Display» klicken, um Aussprache anzuhören

4.4.6. Mit «OK» bestätigen



we integrate. active.

4.5. Änderungen mit «OK» speichern

## 5. Backup


Das Vokabular muss regelmässig extern abgespeichert werden, damit alle Daten im Falle eines Defektes auf ein neues Gerät geladen werden können.

5.1. Toolbox öffnen

5.2. USB-Stick einstecken

5.3. «Menü Speicherübertragung»  wählen

5.4. Sicherung mit USB-Stick durchführen

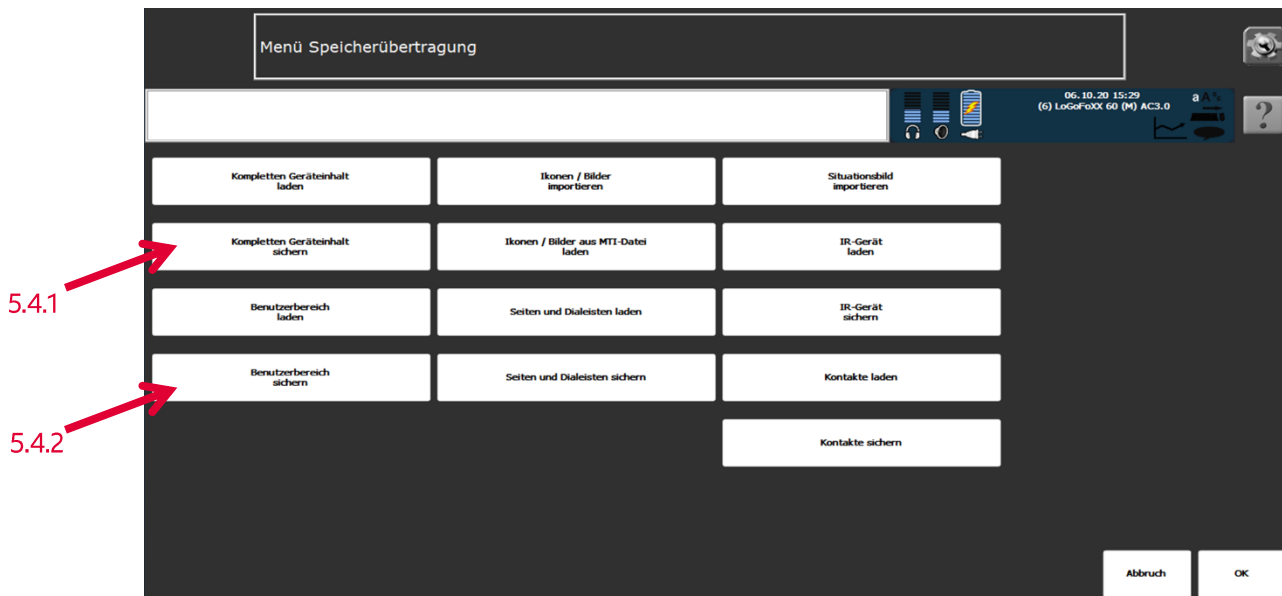

5.4.1. «Kompletten Geräteinhalt sichern» → speichert alle im Talker gespeicherten Daten


oder

5.4.2. «Benutzerbereich sichern» → speichert nur die Daten im Benutzerbereich




we integrate. active.

### 5.4.3. Speicherort wählen

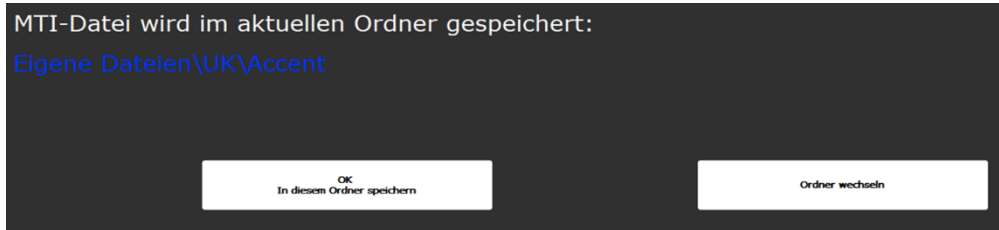


Mit «OK» im angezeigten Ordner bleiben  
oder

Mit «Ordner wechseln» und ggf. «Verzeichnis nach oben» (nicht abgebildet) den USB-Stick suchen

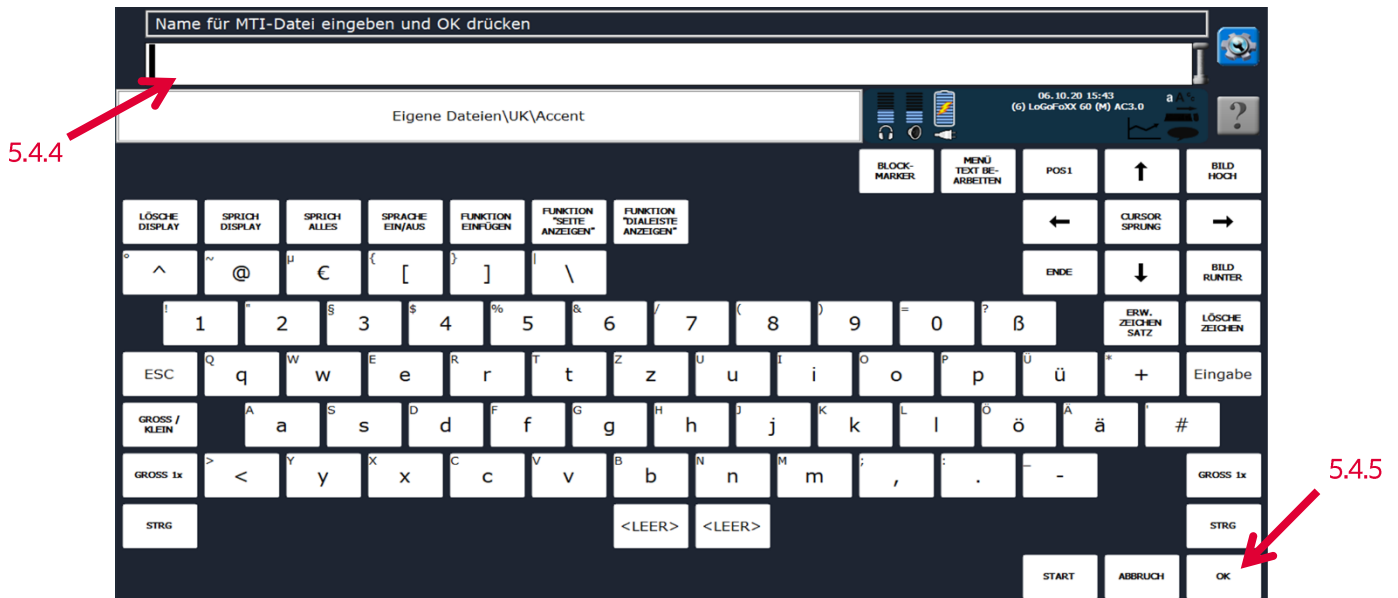

5.4.4. Dateinamen eingeben (z.B. HansMustermann20201006)

5.4.5. Mit «OK» bestätigen

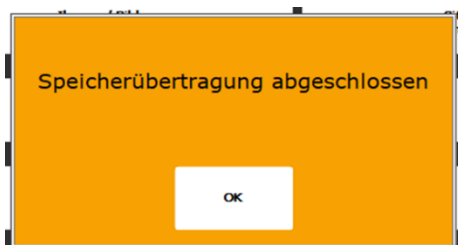

5.4.6. Wenn die Meldung «Speicherübertragung abgeschlossen» erscheint, mit 3x «OK» zum Vokabular zurückkehren und USB-Stick entfernen