

Kurzanleitung GoTalk NOW





Inhaltsverzeichnis

In der vorliegenden Kurzanleitung werden folgende Punkte beschrieben:

1.	Startseite: Nutzermodus vs. Seiteneditor	3
	Neues Kommunikationsbuch eröffnen	
	Taste bearbeiten	
	Sprachausnahmen	
	Backup	



1. Startseite: Nutzermodus vs. Seiteneditor



Nutzermodus:

- > zum Kommunizieren
- > erkennbar am grünen Häuschen
- → So erhält der Nutzer sein Gerät




Seiteneditor:

- > zum Programmieren
- > erkennbar am orangen Häuschen



Wechsel zwischen Nutzermodus und Seiteneditor via Startseite:

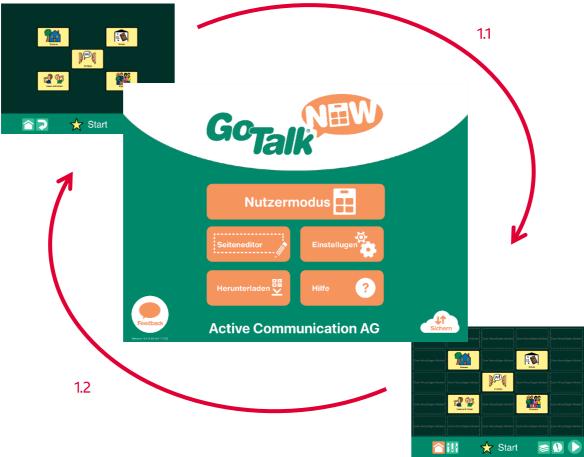

- 1.1. Nutzermodus → Seiteneditor
 - 1.1.1. Mit drei Fingern gleichzeitig von oben nach unten wischen

oder

8 Sekunden auf das grüne Häuschen drücken

- 1.1.2. Startseite erscheint
- 1.1.3. «Seiteneditor» anwählen



1.2. Seiteneditor → Nutzermodus

- 1.2.1. Lange auf oranges Häuschen drücken, bis Nutzermodus automatisch erscheint oder
 - Oranges Häuschen drücken
- 1.2.2. Startseite erscheint
- 1.2.3. «Nutzermodus» anwählen




2. Neues Kommunikationsbuch eröffnen

- 2.1. Startseite öffnen
- 2.2. Doppelklick auf den Namen des aktuell geöffneten Kommunikationsbuches



- 2.3. Alle bereits erstellten Kommunikationsbücher werden angezeigt
- 2.4. Neues Kommunikationsbuch eröffnen



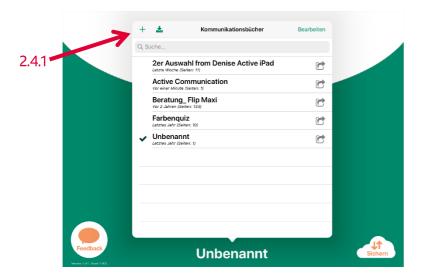

- 2.4.1. «+» drücken
- 2.4.2. Name des Kommunikationsbuches eingeben (nicht abgebildet)
- 2.4.3. Mit «Erstellen» bestätigen



3. Taste bearbeiten

3.1. Im Nutzermodus den Namen der Seite einprägen, auf welcher eine Taste bearbeitet oder neu erstellt werden soll




- 3.2. Nutzermodus → Seiteneditor
- 3.3. Liste mit allen bereits erstellten Seiten mittels Blätterstapel aufrufen



3.4. Gewünschte Seite auswählen (ggf. scrollen)




3.5. Auf der gewünschten Seite die zu bearbeitende Taste anwählen

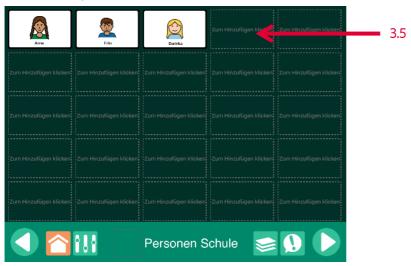

3.6. Taste bearbeiten

3.6.1. Buttontext einfügen

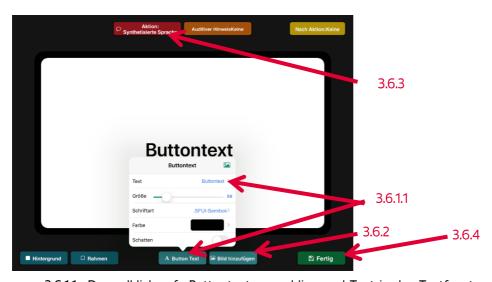

3.6.1.1. Doppelklick auf «Buttontext», anschliessend Text in das Textfenster schreiben (nicht abgebildet)

oder

Schaltfläche «Button Text», dann «Buttontext» anwählen (siehe Bild oben), anschliessend Text in das Textfenster schreiben

- 3.6.1.2. Bereich des grossen Feldes antippen, um Textfenster zu schliessen
- 3.6.1.3. Text mit 1 Finger verschieben und/oder mit 2 Fingern in der Grösse anpassen



3.6.2. «Bild hinzufügen» drücken, sodass aus folgenden Optionen gewählt werden kann:



- (1) Piktogramm einfügen mittels «Metacom» oder «PCS German»
- (2) Suche im Internet (benötigt WLAN)
- (3) Unter «Foto machen» direkt mit der iPad-Kamera ein Foto aufnehmen
- (4) Mit «Fotoalbum» ein Foto aus der iPad-Bildergalerie auswählen
- 3.6.3. Unter «Aktionen» aus den beiden Optionen wählen:



- (1) «Synthetisierte Sprache» wird zunächst automatisch eingerichtet. Zuvor eingefügter Buttontext wird dadurch mit der synthetischen Stimme gesprochen. (Details siehe nachfolgender Abschnitt «Sprachausnahmen»)
- (2) Unter «Aufnahme» eine eigene Tonaufnahme erstellen
- 3.6.4. Änderungen mit «Fertig» abschliessen
- 3.7. Seiteneditor → Nutzermodus



4. Sprachausnahmen


Sprachausnahmen werden in GoTalk NOW auf den einzelnen Tasten erstellt.

- 4.1. Bei der Tastenbearbeitung unter «Aktion» «synthetisierte Sprache» wählen
- 4.2. Falls Aussprache des Wortes nicht wie gewünscht, phonetische Schreibweise in das leere Feld eingeben.

5. Backup

Das Vokabular muss regelmässig extern abgespeichert werden, damit alle Daten im Falle eines Defektes auf ein neues Gerät geladen werden können. Das Backup muss für jedes Kommunikationsbuch separat durchgeführt werden.

- 5.1. Schritte 2.1-2.2 aus Abschnitt 2 «Neues Kommunikationsbuch eröffnen» wiederholen
- 5.2. Pfeil rechts neben dem Namen des aktuellen Kommunikationsbuches antippen

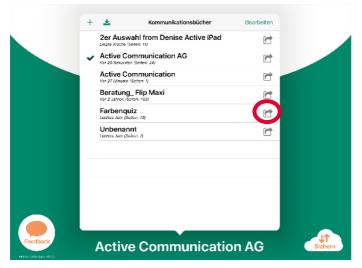




5.3. «Komprimiertes Buch teilen» anwählen



5.4. «In Dropbox speichern» wählen

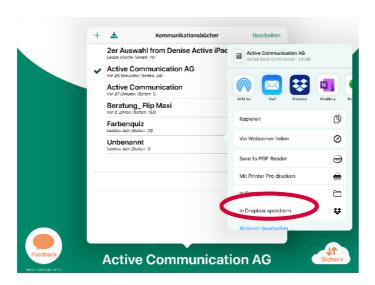



5.5. ggf. Kontrolle, ob der Ordner GoTalkNOW als Speicherort gewählt ist (Name kann vom Beispiel hier abweichen)



- 5.6. «Speichern» tippen
- 5.7. ggf. letzte Sicherungsdatei mit «Ersetzen» überschreiben. Falls nicht gewünscht, unter «Datei» den Namen ändern.



5.8. In den Nutzermodus zurückkehren