



we integrate. active.

Wichtigste Informationen zum MetaTalk

Editor/Emulation



Im App Store des iPads ist die MetaTalk Companion App für CHF 25.00 zu erwerben.

Diese App besitzt sämtliche Funktionen der Sprachsoftware MetaTalk, jedoch keine Sprachausgabe. Es können also Vokabulare angepasst und geteilt werden.

Softwareupdates

Über die Käufe im App Store des iPads sind Updates der Kommunikationssoftware MetaTalk zu finden.

ACHTUNG: Mit der Durchführung der iOS-Software-Updates sollte mindestens 2-3 Wochen nach deren Erscheinen zugewartet werden.

Kurzanleitung zur Memobox



Inhalte des Mitteilungsfensters können in die Memobox (siehe Pfeil 1) der Kommunikationssoftware MetaTalk abgespeichert werden. Wir empfehlen diese Funktion dann zu nutzen, wenn mit einem Skript bzw. Ablaufplan gearbeitet werden soll (z.B. für Botengänge).

Durch langes Drücken auf die Aussage im Mitteilungsfenster öffnet sich ein Menü, hier die Option «In Memobox speichern» (siehe Pfeil 2) wählen und der Satzstreifen wird in der Memobox abgespeichert.

Kurzanleitung zum Exportieren von Satzstreifen in der sprechenden Agenda Niki Diary

Inhalte des Mitteilungsfensters können ebenfalls in der Fotogalerie des iPads gespeichert und so in die sprechende Agenda NikiDiary importiert werden. Hierzu nach dem langen Drücken auf die Aussage im Mitteilungsfenster die Option «Speichern in Fotos» (siehe Pfeil 3) wählen.



we integrate. active.

Herstellerinfo



Auf der Metacom-Webseite finden sich viele nützliche Informationen, Anregungen und Vorlagen.

<https://metacom-symbole.de/>