



we integrate. active.

## Wichtigste Informationen zu TD Snap

### Emulation



Auf der Internetseite von Tobii Dynavox ist für die Kommunikationssoftware TD Snap eine kostenlose Version für Windows verfügbar. Diese besitzt sämtliche Funktionen der Kommunikationssoftware TD Snap, jedoch keine Sprachausgabe. Es können also Vokabulare angepasst und geteilt werden.


<https://www.mytobiidynavox.com/Support/SnapCoreFirst?msclid=43deda68d06c11ec90be1dcc2764a046>

### Softwareupdates


Über die Käufe im App Store des iPads sind Updates der Kommunikationssoftware TD Snap zu finden.

**ACHTUNG:** Mit der Durchführung der iOS-Software-Updates sollte mindestens 2-3 Wochen nach deren Erscheinen zugewartet werden.

### Kurzanleitung in Feld kopieren

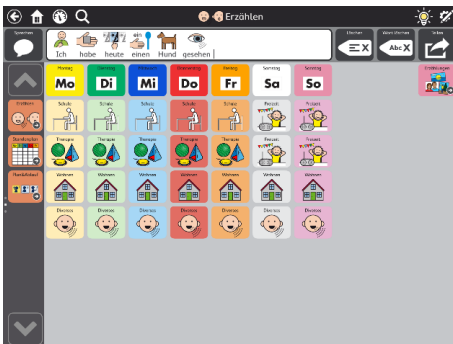

Mit Hilfe dieser Funktion kann eine im Mitteilungsfenster verfasste Aussage direkt in ein Feld kopiert werden. Dies kann beispielsweise genutzt werden, um Erlebnisse auf einer eigens dafür erstellten Seite einzufügen.

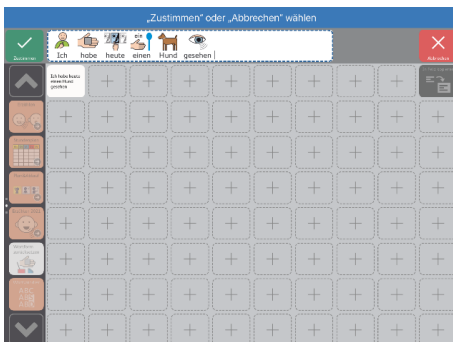

Auf der Erlebnisseite kann der Button «In Feld kopieren» angewählt werden, anschliessend kann eines der leeren Felder mit der Aussage aus dem Mitteilungsfenster belegt werden. Zum Schluss mit dem Button «Zustimmen» bestätigen.

**ACHTUNG:** Keine bereits belegten Felder auswählen, da diese sonst überschrieben werden!



we integrate. active.

## Herstellerinfo

Link zur Tauschbörse



Auf Pageset Central befinden sich Seitensets zu verschiedensten Themen, welche gratis heruntergeladen und in der Kommunikationssoftware TD Snap eingesetzt werden können.

<https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>

Link zu den Videos und Online-Schulungen



Auf der Internetseite von Tobii Dynavox finden sich Videoanleitungen zur Kommunikationssoftware TD Snap.

<https://de.tobiidynavox.com/blogs/videothek>



Auf der Internetseite von Tobii Dynavox ist zudem ein Zugang zu Live-Schulungen durch TD Snap zu finden.

<https://de.tobiidynavox.com/blogs/offentliche-veranstaltungen>