



we integrate. active.

# Kurzanleitung

## NovaChat / LogoFoXX 60





we integrate. active.

## Inhaltsverzeichnis

In der vorliegenden Kurzanleitung werden folgende Punkte beschrieben:

1.	Menüsperre / Kioskmodus .....	3
2.	Taste bearbeiten.....	5
3.	Sprachausnahmen.....	9
4.	Backup.....	11



we integrate. active.

## 1. Menüsperrung / Kioskmodus

Menüsperrung: schützt die Bearbeitung und die Einstellungen mit einem Passwort

Kioskmodus: macht das Hilfsmittel zu einem geschlossenen System und heftet die App an, damit kein Zugang zu anderen Apps besteht

### 1.1. Menüsperrung deaktivieren



1.1.1. Gerät via Zurück-Taste  (länger gedrückt halten) ...

1.1.2. ... entsperren. Passwort eingeben und mit «OK» bestätigen


### 1.2. Menüsperrung aktivieren

1.2.1. Länger  drücken


1.2.2. «Sperren» drücken



we integrate. active.

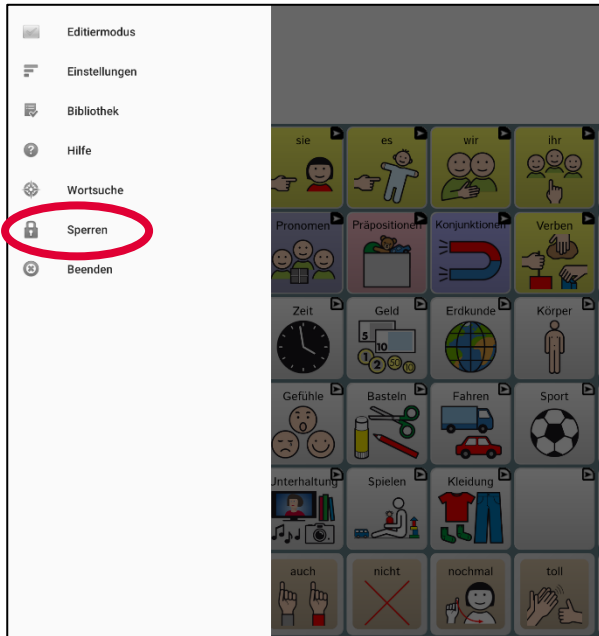



### 1.3. Kioskmodus aktivieren/deaktivieren

1.3.1. Im entsperrten Modus länger auf die  drücken

1.3.2. Im Menü auf Einstellungen tippen

1.3.3. In den Einstellungen auf «System» drücken

1.3.4. Unter dem Menüpunkt «Kiosk-Modus» aktivieren/deaktivieren

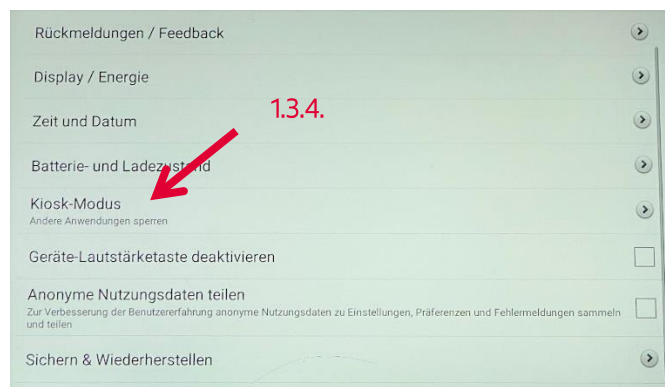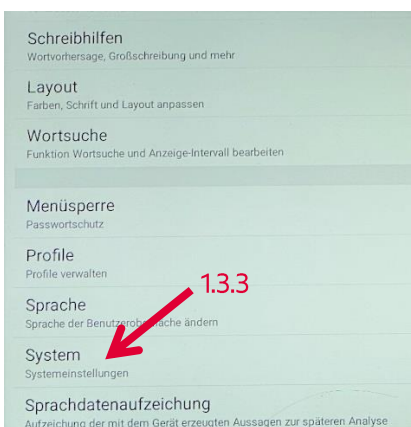



we integrate. active.


## 2. Taste bearbeiten

2.1. Menüsperre deaktivieren

2.2. Kioskmodus aktiviert lassen

2.3. Editiermodus aktivieren

Der Editiermodus ist auch erkennbar durch die rote Schrift mit Seitennamen am unteren Bildschirmrand (siehe auf der nachfolgenden Seite 6, Punkt 2.5.).

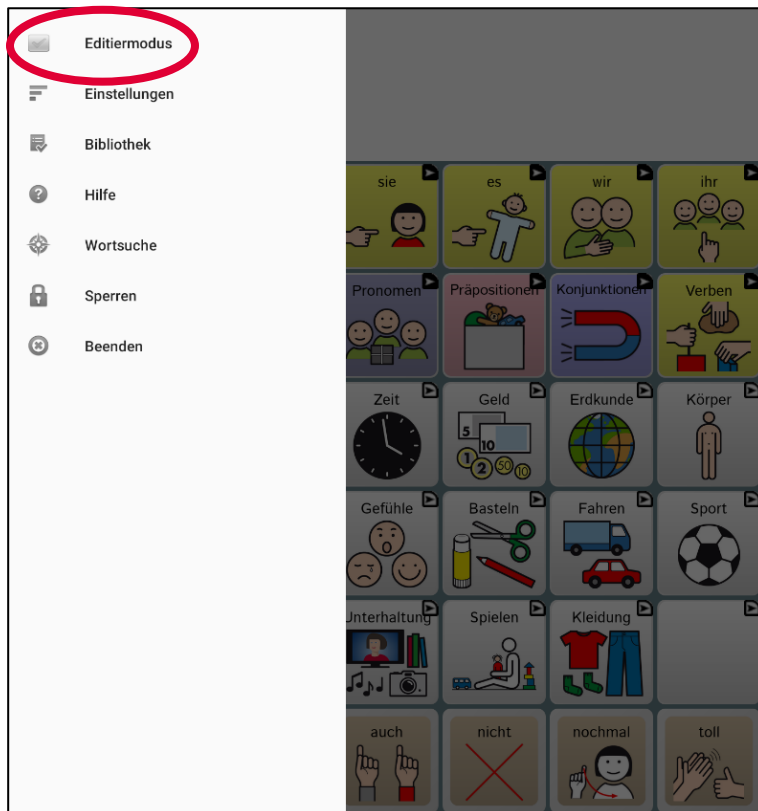


2.4. Zur Seite navigieren, auf welcher das gewünschte Feld eingefügt werden soll



we integrate. active.

## 2.5. Gewünschtes Feld lange drücken, bis folgendes Menü erscheint:

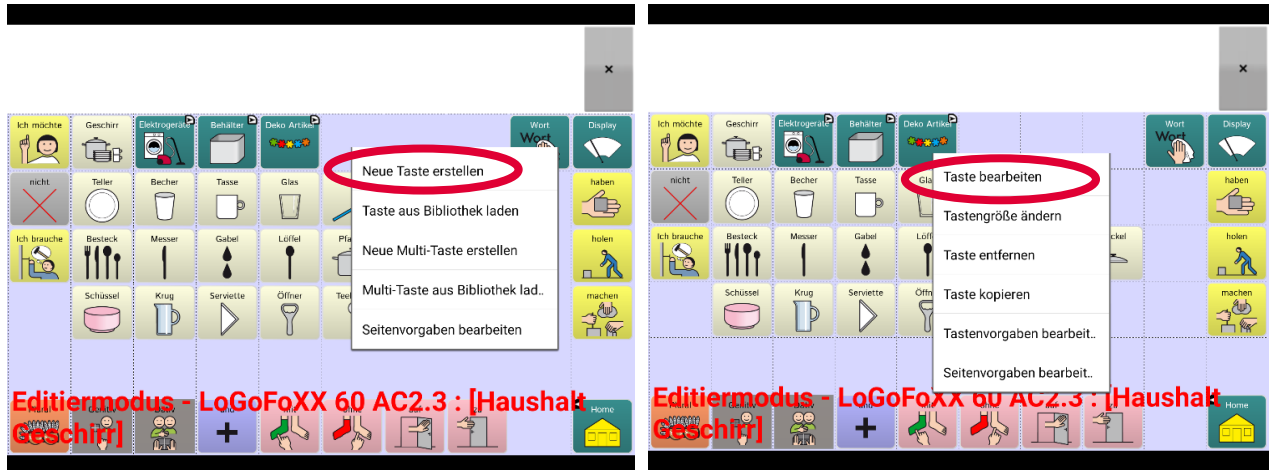

Neue Taste erstellen:

leeres Feld wird angewählt → Inhalt soll neu erstellt werden

Taste bearbeiten:


bereits belegtes Feld wird angewählt → Inhalt soll verändert werden


## 2.6. Taste bearbeiten





we integrate. active.

- 2.6.1. Label: Text auf Taste
- 2.6.2. Mitteilung: gesprochener Text → entspricht Label, wenn nicht anders eingegeben
- 2.6.3. Bild:
- Import: Zugriff auf Fotos in Android-Galerie 
  - Kamera: jetzt ein Foto machen
  - Laden: Piktogramm einfügen
    - a. Suchbegriff eingeben
    - b. direkt oder in aufgelisteter Symbolsammlung suchen

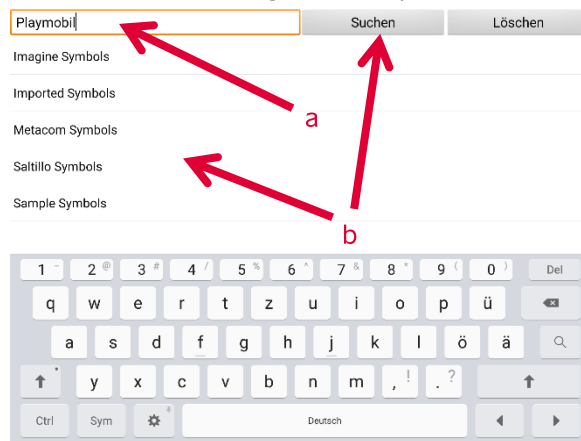

2.6.4. Mit «OK» beenden




we integrate. active.


## 2.7. Layout anpassen



2.7.1. Taste mit richtigem Layout lange drücken → «Taste kopieren» wählen

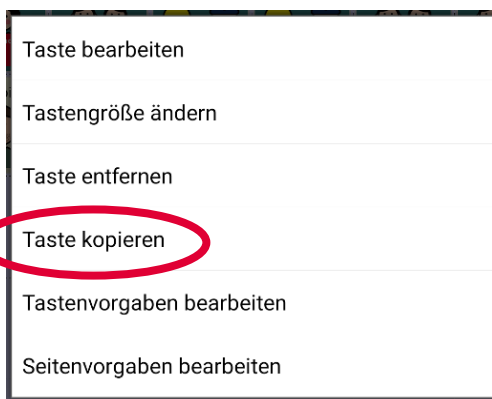

2.7.2. Anzupassende Taste lange drücken → «Tastenlayout einfügen» wählen

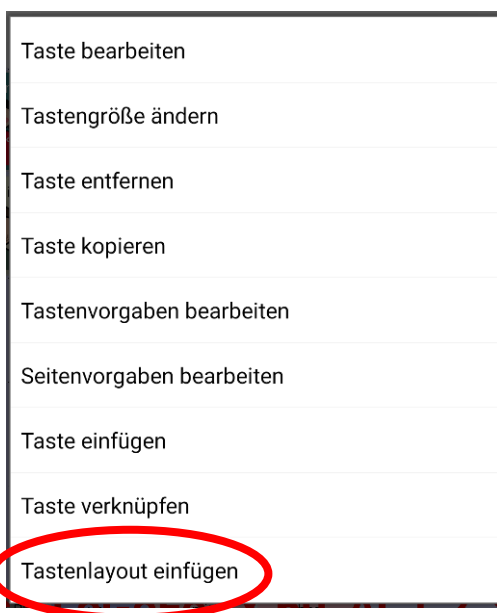

## 2.8. Menüsperre und Kioskmodus aktivieren








we integrate. active.

### 3. Sprachausnahmen

- 3.1. Menüsperre deaktivieren
- 3.2. Kioskmodus aktiviert lassen
- 3.3. Einstellungen öffnen und zu «Ausprache» navigieren

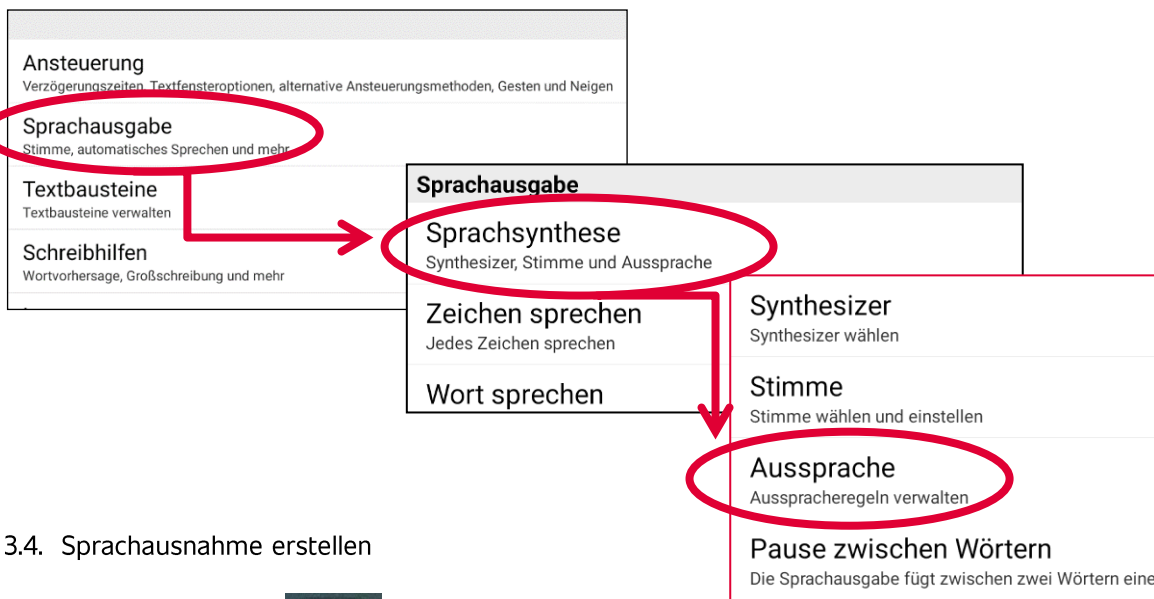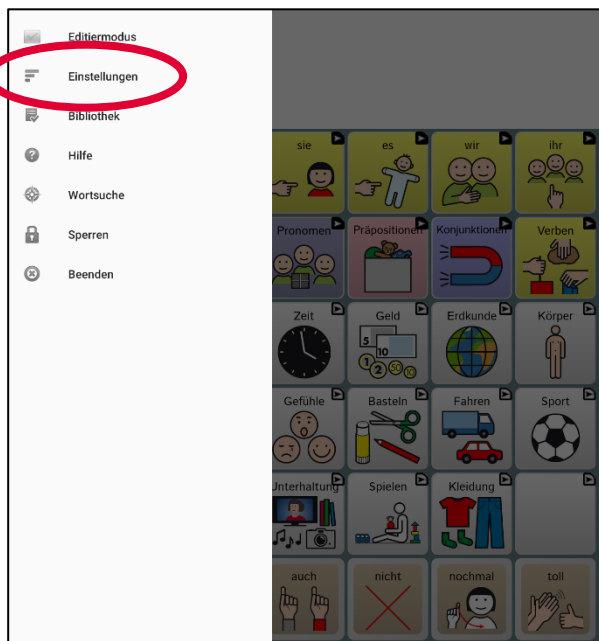


#### 3.4. Sprachausnahme erstellen

3.4.1. Zuerst länger  drücken, dann «Neu» wählen



we integrate. active.

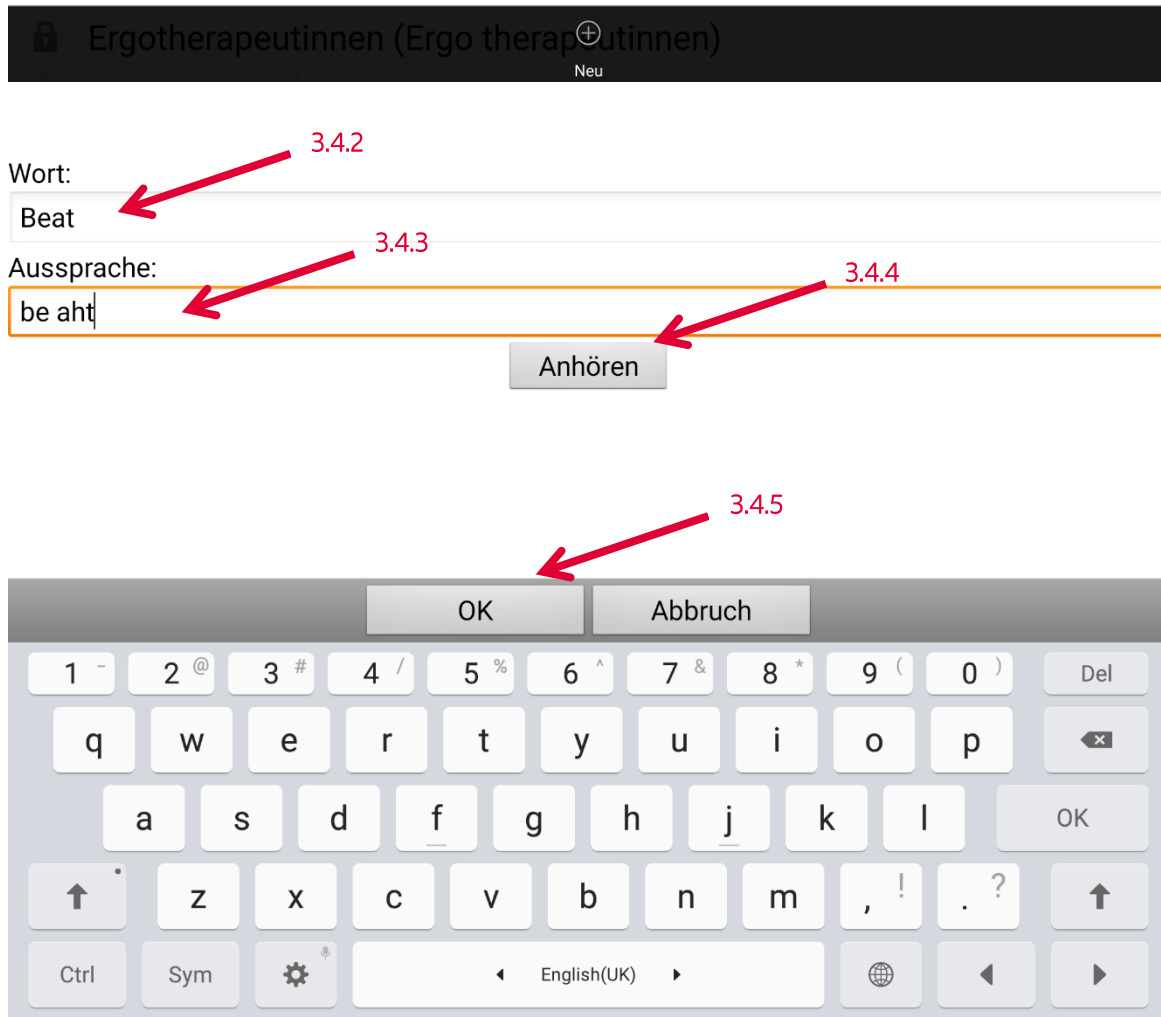

3.4.2. Wort → korrekte Schreibweise

3.4.3. Aussprache → lautgetreue Schreibweise

3.4.4. Aussprache «Anhören»

3.4.5. Mit «OK» bestätigen

3.5. Mit 4x  geht's zurück zum Vokabular

3.6. Menüsperre und Kioskmodus aktivieren



we integrate. active.

## 4. Backup


Das Vokabular muss regelmässig extern abgespeichert werden, damit alle Daten im Falle eines Defektes auf ein neues Gerät geladen werden können.

Die Datensicherung wird ausserdem benötigt, um das Vokabular in den Editor laden zu können.

4.1. Menüsperre deaktivieren

4.2. Kioskmodus aktiviert lassen

4.3. Bibliothek öffnen

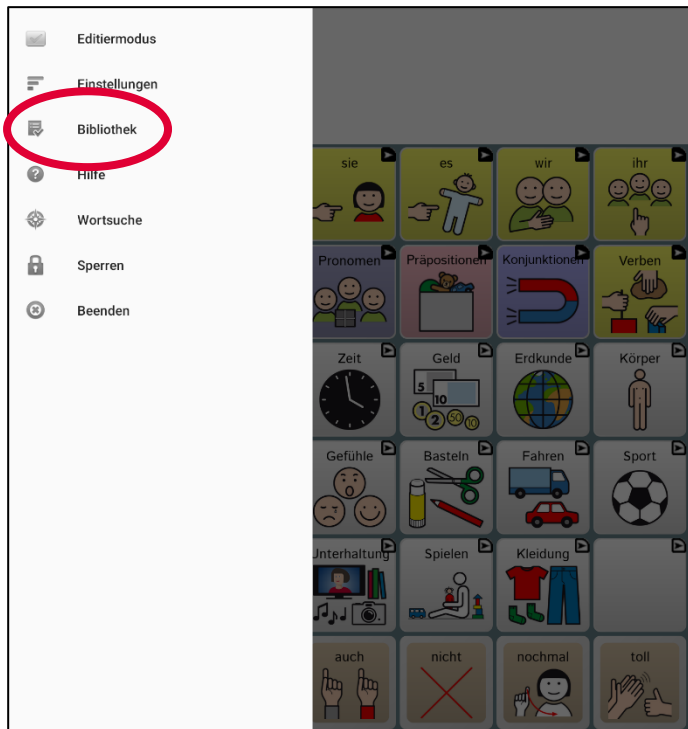

Die Bibliothek mit den verschiedenen Vokabularen öffnet sich. Das Vokabular mit dem grünen Häkchen ist das aktuelle Vokabular.



we integrate. active.

Benutzervokabular

LoGoFoXX 60 AC2.2

Benutzervokabular

✓ LoGoFoXX 60 AC2.2\_Susanna

Benutzervokabular

LoGoFoXX 60\_AC1.5\_Kopie



#### 4.4. Sicherung mit USB-Stick durchführen

4.4.1. USB-Stick einstecken

4.4.2. Auf die 3 Punkte oben rechts im Eck klicken

4.4.3. Auf Import/Export klicken

4.4.4. Speicherort auswählen

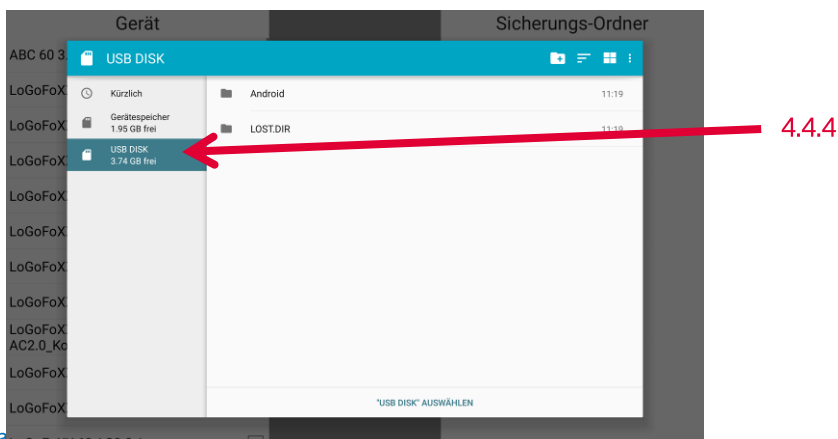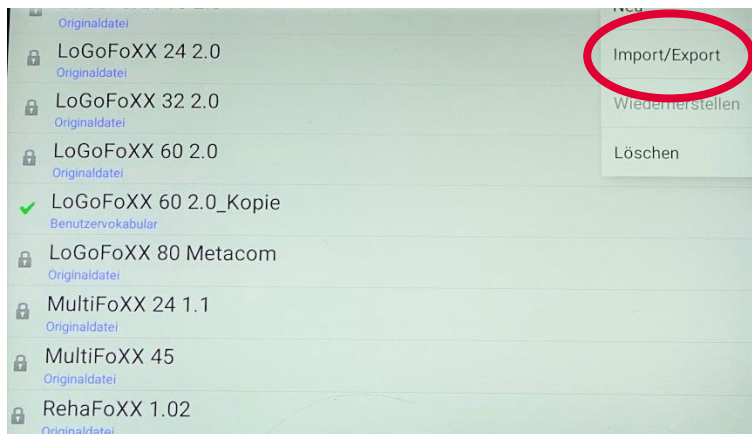




we integrate. active.

#### 4.4.5. USB-Stick anwählen


#### 4.4.6. Mit «Auswählen» bestätigen

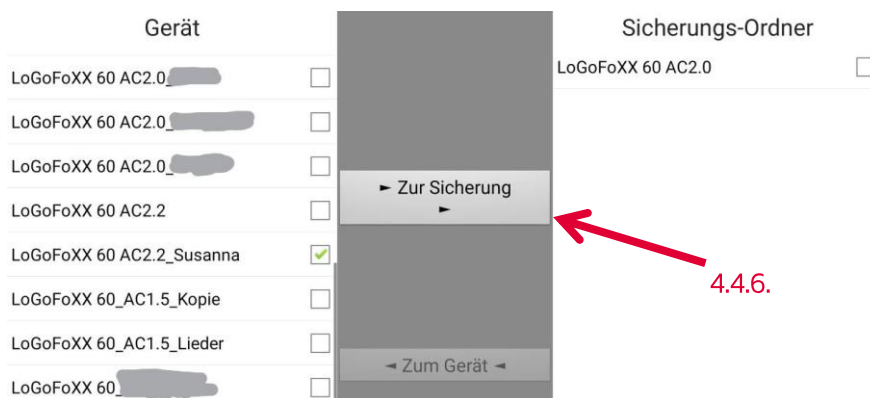

#### 4.4.7. Häkchen setzen beim zu sichernden Vokabular

#### 4.4.8. «Zur Sicherung» anwählen → Vokabular ist nun im «Sicherungs-Ordner»

#### 4.5. USB-Stick entfernen

4.6. Mit 2x  geht's zurück zum Vokabular

#### 4.7. Menüsperre aktivieren