

Beckengurt (SAM Sling® bzw. SAM Pelvic Sling II®)

Name und Klasse Studierende/r:

Spezielles: Übungspatient, Helfer 1 wird geprüft, er führt das Kommando.
Material: Einmalhandschuhe, SAM Sling® oder SAM Pelvic Sling II®, Übungspatient

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt OSCE nicht erfüllt Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Handschuhe anziehen (oder benennen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Patient über das Vorgehen und die geplante Massnahme informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Ggf. Gegenstände aus den Hosentaschen oder vom Gürtel des Patienten entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Knie bzw. Füsse zusammenbringen und fixieren z.B. mit einer Zervikalstütze o.Ä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Ausrollen des SAM Sling® (blaue Seite nach unten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Palpation beider Trochanter Major	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Helfer 1 und/oder 2 führen das SAM Sling® unter den Knien des Patienten durch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Helfer 1 und 2 bewegen das SAM Sling® ggf. unter leichtem Anheben und Fixation des Beckens, bis auf Hüfthöhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 Helfer 1 und 2 positionieren das SAM Sling® mittig auf Höhe der Trochanter Major	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Gurt durch die Schnalle führen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Gurt anziehen bis das SAM Sling® satt am Körper anliegt, die Schnalle liegt ungefähr auf der Längsachse des Körpers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Helfer 2 greift die orange Schlinge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Helfer 1 zieht am schwarzen bzw. orangen Gurt, Helfer 2 hält dagegen bis dieser hörbar einrastet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Helfer 1 befestigt, unter Aufrechterhaltung des Zuges, den schwarzen bzw. orangen Gurt am Klettverschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen: Empfehlung aus PHTLS-Kursformat (2020): Stabilisierung: 1. Innenrotation der Beine, 2. Knie zusammenbringen, 3. Beckengurt anlegen

Quelle: Sam Medical (2023). SAM Pelvic sling II, Zugriff am 03.04.2024 unter <https://sammedical.app.box.com/s/16m9mtfaaqvbjo0j9imi1dl3u4dlg74n>